


▶ PUNTAS INSERTOS ULTRASONIDOS

RUMAR
mayorista dental

PARTE 2

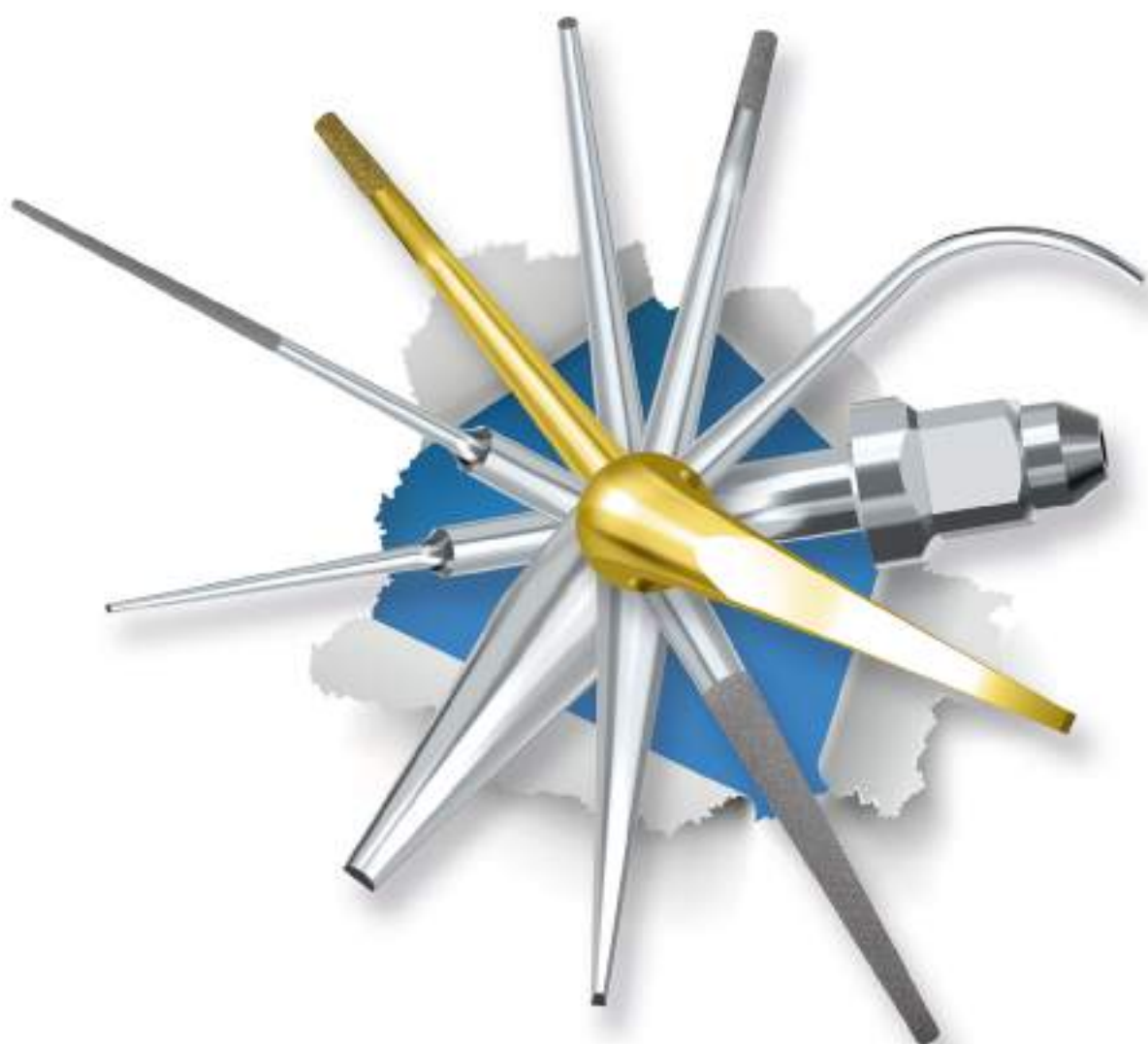

+250 MODELOS COMPATIBLES


¡SIEMPRE EN STOCK, ENTREGA EN 24 HORAS!



PU ▶ PUNTAS / INSERTOS ULTRASONIDOS

¿ CÓMO IDENTIFICAR UNA PUNTA ?

■ Profilaxis	■ Especial
■ Perio	■ Cirugía
■ Endo	◆ Diamantada
■ Tratamiento Caries	■ Ti Baño de Titanio

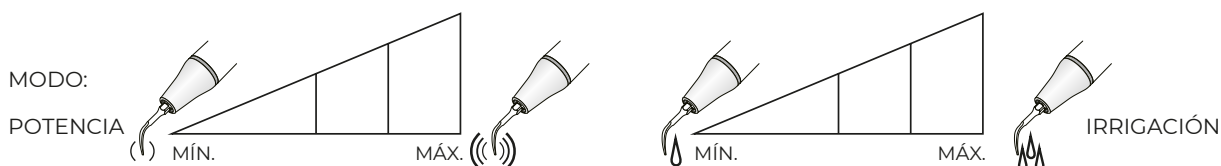

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS ANTERIORES:

MODO X indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.

- **G:** Profilaxis
- **P:** Periodoncia
- **E:** Endodoncia

POTENCIA

- La primera cuadrícula indica que la potencia es del 0 - 30% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- La segunda cuadrícula indica que la potencia es del 30% - 60% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- La tercera cuadrícula indica que la potencia es del 60% - 100% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.

IRRIGACIÓN (Volumen de agua)

- La primera cuadrícula indica que el volumen de agua es del 0 - 30%.
- La segunda cuadrícula indica que el volumen de agua es del 30% - 60%.
- La tercera cuadrícula indica que el volumen de agua es del 60% - 100%.

COMPATIBILIDAD

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| - S: Rosca tipo S | - A: Amdent® y LM® |
| - E: EMS® | - MEC: Mectron® |
| - KS: KaVo® Soniflex 2000 | - KP1: KaVo® Piezolutux |
| - SIR: Sirona® | - KP2: KaVo® PiezoLED |

PUNTAS ESPECIALES PT-A, PT-B, PT5 Y PT-3



P33 | Perio, especial tratamiento bolsas profundas



Diseñada para la eliminación de sarro profundo en la bolsa periodontal y para enjuagar la bolsa periodontal. La punta es delgada y puede utilizarse para el raspado fino de la superficie radicular subgingival.

Para el tratamiento en bolsas periodontales profundas, se debe programar la potencia más baja y en ningún caso se debe exceder el nivel de potencia recomendado.

Para la función de irrigación de la bolsa periodontal, se debe programar el volumen de agua debe más alto.



Confirmar que el caudal de agua de refrigeración alcanza la punta del inserto durante el tratamiento.

Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente y coloque la bola de la punta contra la superficie del diente.



Ref.:

28-P33

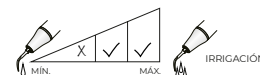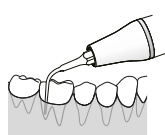


Doblada a la izquierda, está diseñada para la exploración del cálculo subgingival, el alisado radicular y el raspado subgingival.

Zona de utilización: dientes adyacentes.



Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente. La parte delantera o trasera del extremo de 2mm se adapta a la superficie del diente.

Volumen de agua: asegúrese de que el agua de refrigeración llegue al final de la punta.

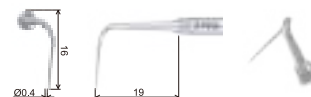

Ref.:

28-P50L

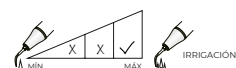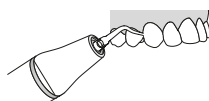

P50R | Perio, especial raspado subgingival




Doblada a la derecha, está diseñada para la exploración del cálculo subgingival, el alisado radicular y el raspado subgingival.

Zona de utilización: dientes adyacentes.


Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente. La parte delantera o trasera del extremo de 2mm se adapta a la superficie del diente.

Volumen de agua: asegúrese de que el agua de refrigeración llegue al final de la punta.

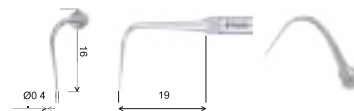

Ref.:

28-P50R

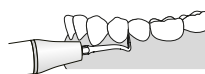


P56 | Perio, especial eliminación grandes acumulaciones sarro



Diseñada grandes acumulaciones de sarro supragingival y biofilm, no daño al tejido gingival cuando la limpieza se hace en el margen de este.


Zona de utilización: zonas palatal/lingual y labial/bucal de todos los dientes. Especialmente diseñada para la eliminación de cálculo en la cara lingual. Confirmar que el caudal de agua de refrigeración alcanza la punta del inserto durante el tratamiento.

Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente y coloque la bola de la punta contra la superficie del diente.

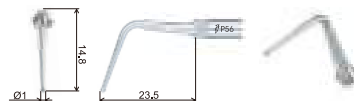

Ref.:

28-P56

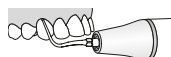

AMDENT y LM

A1 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos




Eliminación de los depósitos supragingivales, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

***Llaves LM no valen para esta punta.**

Ref.:

28-A1

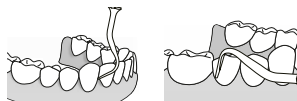

A2 | Depósitos supragingivales (incluido cuello y parte adyacente)




Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluido el cuello y la parte adyacente de los dientes.

***Llaves LM no valen para esta punta.**

Ref.:

28-A2

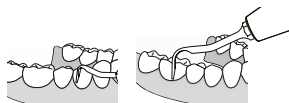

KaVo® Sonosoft® y Piezolux®



GC1 | Profilaxis, Sichel hoz, depósitos supragingivales



Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GC1

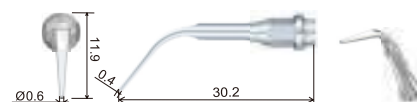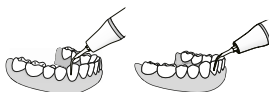


GC2 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interdental y cuello



Eliminación del cálculo supragingival, interdental y en el cuello de los dientes.

Ref.:

28-GC2

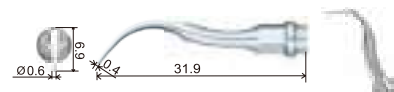

PC1 | Perio, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

Ref.:

28-PC1



KaVo® Sonicflex 2000N/L, 2003 /L y R-Tech® ECOS2

■ GK1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



KS


Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:


28-GK1



MODO:
POTENCIA

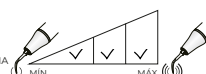

IRRIGACIÓN

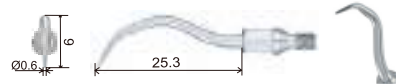

■ GK2 | Profilaxis, Sichel hoz, especial sarro abundante




KS


Eliminación de sarro abundante y placa supragingival.

Ref.:


28-GK2

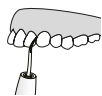

MODO:
POTENCIA

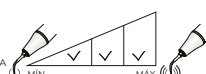

IRRIGACIÓN

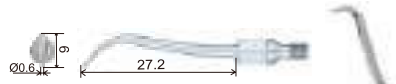

■ GK3 | Profilaxis, especial interdental y cuello




KS


Eliminación de depósitos supragingivales, interdental y en el cuello de los dientes.

Ref.:


28-GK3

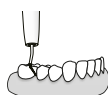

MODO:
POTENCIA

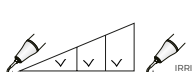

IRRIGACIÓN

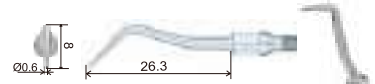

■ GK4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos



KS

Eliminación de depósitos supragingivales, especialmente en las zonas interproximales y surcos.

Ref.:

28-GK4



MODO:
POTENCIA



IRRIGACIÓN



■ GK5 | Profilaxis, depósitos supragingivales



KS

Eliminación los depósitos supragingivales.

Ref.:


28-GK5



MODO:
POTENCIA



IRRIGACIÓN

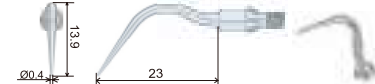

■ GK6 | Profilaxis, depósitos supragingivales (angulada izquierda)





KS

Eliminación de depósitos supragingivales. Angulada a la izquierda.

Ref.:

28-GK6

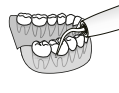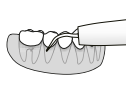

MODO:
POTENCIA



IRRIGACIÓN




GK7 | Profilaxis, depósitos supragingivales (angulada derecha)



Eliminación de depósitos supragingivales.
Angulada a la derecha.

Ref.:

28-GK7

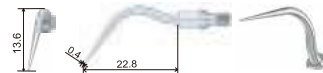

KaVo® PiezoLED®, PiezoSOFT® y compatibles



PC60 | Profilaxis, espacios interproximales y raspado supragingival



Tratamiento de espacios interproximales y raspado supragingival.

Ref.:

28-PC60

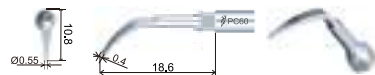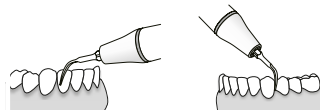


PC61 | Perio, bolsas periodontales profundas, dientes adyacentes y zona de la zanja



Diseñada para eliminar el sarro en la bolsa periodontal poco profunda y tratar la superficie del diente adyacente y la zona de la zanja. La punta es plana y ancha, y se puede utilizar para limpiar la superficie de los dientes en subgingival 1/4 y la parte supragingival.

Ref.:

28-PC61

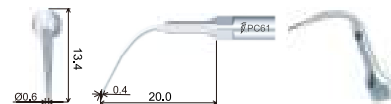



PC62 | Perio, bolsas periodontales profundas



Diseñada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PC62

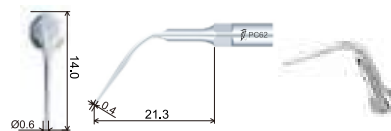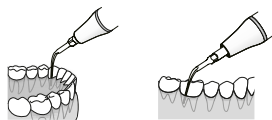

SIRONA SIROSONIC / L / TL, PERIOSONIC, PERIOSCAN

GS1 | Profilaxis, depósitos supragingivales




SIR

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GS1

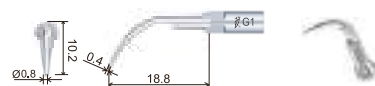

GS2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes





SIR

Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:

28-GS2

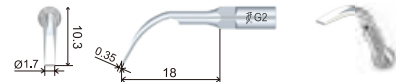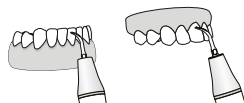

GS3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos





SIR

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

Ref.:

28-GS3

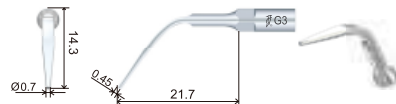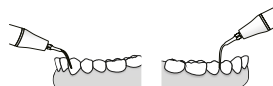

GS4 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximales




SIR

Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:

28-GS4

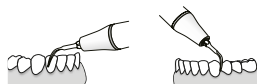

GS5 | Profilaxis, depósitos supragingivales




SIR

Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.

Ref.:

28-GS5

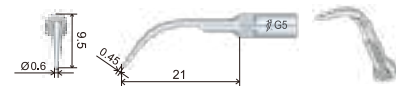

PS1 | Perio, depósitos subgingivales




SIR

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:

28-PS1

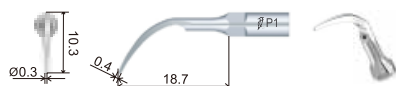

PS3 | Perio, bolsas periodontales profundas





SIR

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PS3

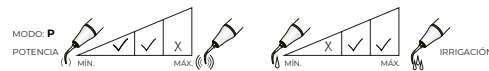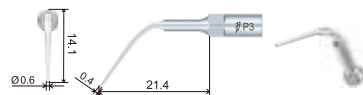

PS4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas





SIR

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PS4

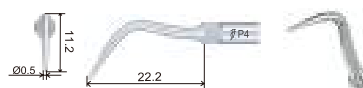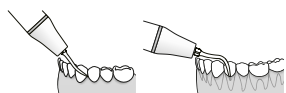

PS4D | Perio, diamantada, especial orientación canal radicular




SIR

Punta diamantada (40µm) diseñada para la orientación del conducto radicular. También puede aplicarse para eliminar las calcificaciones situadas en el primer tercio del conducto radicular. No presione demasiado durante el tratamiento para evitar dañar el conducto radicular.

Ref.:

28-PS4D

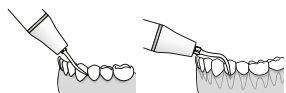

ES1 | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)





SIR

Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores.

Ref.:

28-ES1

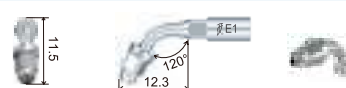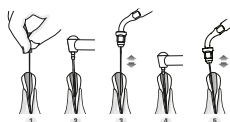

ES2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)





SIR

Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores.

Ref.:

28-ES2

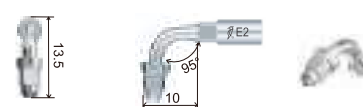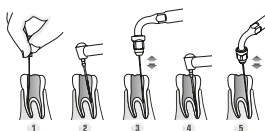

ES3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha





SIR

Recomendado para fundir gutapercha. Sumergir el instrumento en eugenol antes de introducirlo en el conducto. Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active el escarificador para condensar hasta llenar el conducto.

Ref.:

28-ES3

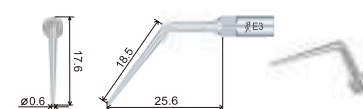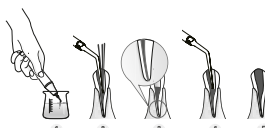

ES3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas




SIR

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así la extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.

Ref.:

28-ES3D

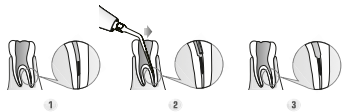

ES4 | Endodoncia, especial obstrucciones




SIR

Diseñada para eliminar obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular. Longitud de la parte delgada de la punta: 22 mm.

Ref.:

28-ES4

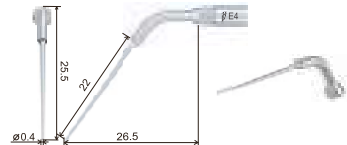

ES4D | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos





SIR

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para eliminar la calcificación y material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del mismo. Longitud de la parte diamantada: 15 mm.

Ref.:

28-ES4D

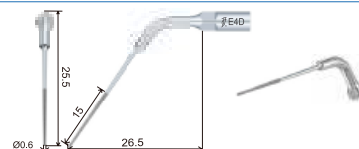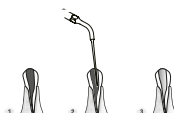

ES5 | Endodoncia, especial obstrucciones




SIR

Diseñada para eliminar las obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular. Longitud de la parte delgada de la punta: 16 mm.

Ref.:

28-ES5

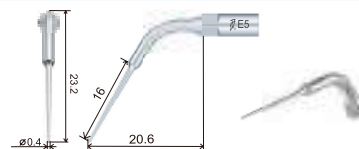

ES5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones





SIR

Punta diamantada (40µm) para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular. La longitud de la punta diamantada es de 10 mm.

Ref.:

28-ES5D

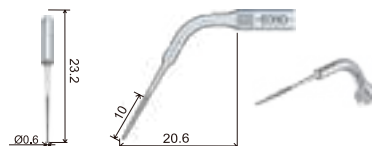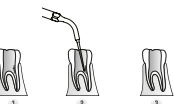

ES10D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular




SIR

Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares. La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.

Ref.:

28-ES10D

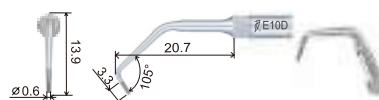

■ ES14 | Endodoncia especial extracción limas rotas





SIR

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ES14

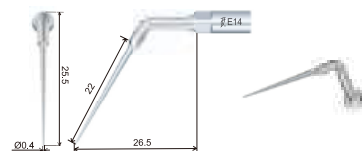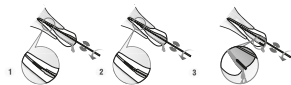

■ ES15 | Endodoncia especial extracción limas rotas





SIR

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ES15

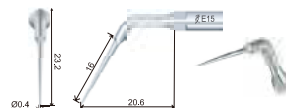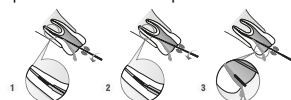

PUNTAS CIRUGÍA WOODPECKER SURGIC TOUCH, ULTRASURGERY, US-II, DTE DS-II Y SURGIC X COMPATIBLE "MECTRON - CIRUGÍA"



UC1 | Extracción (Similar Mectron® EX1)




MEC


Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular.

Ref.:

28-UC1

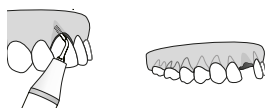

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongy)

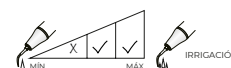

UC2 | Extracción




MEC

Angulada a la izquierda. Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular en zonas posteriores.

Ref.:

28-UC2

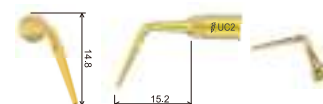

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongy)



UC3 | Extracción




MEC

Angulada a la derecha. Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular en zonas posteriores.

Ref.:

28-UC3

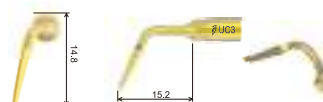

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongy)



UE1 | Endodoncia, diamantada (Similar Mectron® EN1)




MEC

Punta diamantada (40µm) para el desbridamiento radicular apical y para un alisado radicular eficaz.
La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.

Ref.:

28-UE1

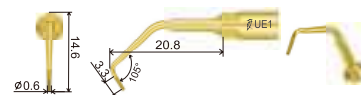

MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Endo (potencia máxima permitida)



UE2 | Endodoncia (Similar Mectron® EN2)




MEC

Se utiliza para la limpieza suave del canal radicular.
La longitud de la parte lisa delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:

28-UE2

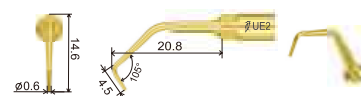

MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Endo (potencia máxima permitida)



UL1 | Elevación, membrana sinusal (Similar Mectron® EL3)





MEC


Ángulo de la punta 120°, separación de la membrana sinusal en zonas internas. Elevador no cortante de la membrana sinusal.

Ref.:

28-UL1

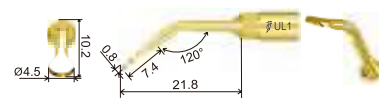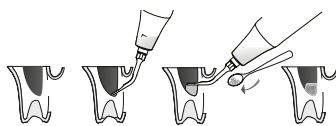

MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Endo (potencia máxima permitida)

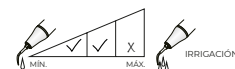

UP1 | Perio (Similar Mectron® PS1)




MEC

Recomendado para raspados periodontales suaves.

Ref.:

28-UP1

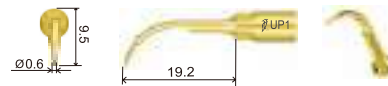

MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Perio



US1 | Osteotomía (Similar Mectron® OT6)




MEC

Gran eficacia en la osteotomía de grandes secciones óseas durante la cirugía maxilofacial, también puede utilizarse para la exodoncia.

Ref.:

28-US1

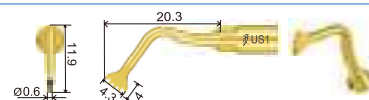

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



US2 | Osteotomía (Similar Mectron® OT7)




MEC


Técnica de osteotomía de alta eficacia en maxilar y mandíbula. (expansión de la cresta, técnica de corticotomía, injerto de bloque óseo)

Ref.:

28-US2

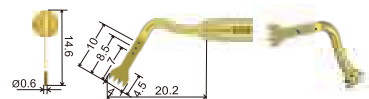

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)

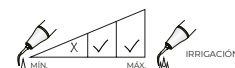

US3 | Osteotomía (Similar Mectron® OT2)




MEC


Osteotomía de gran precisión en estructuras anatómicamente delgadas.

Ref.:

28-US3

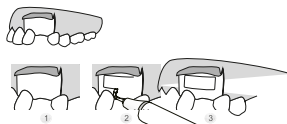

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)

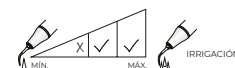

US4 | Osteoplastia (Similar Mectron® OP3)



MEC

Universal osteoplastia: osteotomía periodontal, recuperación de hueso, eliminación de tejido inflamatorio. (quistes, etc.)

Ref.:

28-US4



MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



■ US5 | Osteoplastia (Similar Mectron® OP1)




MEC


Osteoplastia de hueso de alta eficiencia: remodelación ósea y recuperación de hueso.

Ref.:

28-US5

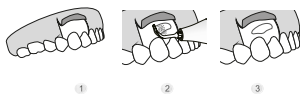

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)

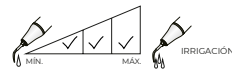

■ US1L | Osteotomía (Similar Mectron® OT8L)




MEC

Angulada a la izquierda 90°, diseñada para técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula.

Ref.:

28-US1L

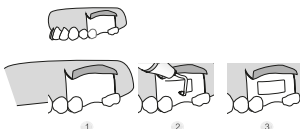

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



■ US1R | Osteotomía (Similar Mectron® OT8R)




MEC

Angulada a la derecha 90°, diseñada para técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula.

Ref.:

28-US1R

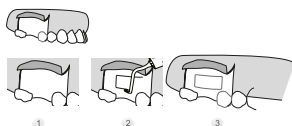

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)



■ UL2 | Separación membrana sinusal (Similar Mectron® EL1)



MEC


Diseñada para separar la membrana de Schneider de las paredes óseas. Separación de la membrana sinusal.

Ref.:

28-UL2



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Endo (potencia máxima permitida)

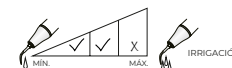

■ UL3 | Osteotomía / Osteoplastia (Similar Mectron® OT5)



MEC


Punta con revestimiento de diamante (100µm)
Diseñada para osteotomía y osteoplastia micrométrica: atraumático, para finalizar la osteotomía y osteoplastia en hueso delgado y/o cerca de estructuras anatómicas delicadas.

Ref.:

28-UL3



MODO: RAÍZ (ROOT)
POTENCIA: Endo (potencia máxima permitida)

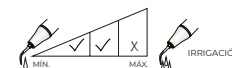

■ UL4 | Osteotomía (Similar Mectron® OT1)




MEC

Punta con revestimiento de diamante (100µm)
Diseñada para osteotomía micrométrica: para finalizar la osteotomía en proximidad de tejidos blandos (membrana sinusal, vaso, nervio alveolar)

Ref.:

28-UL4

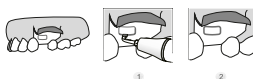

MODO: HUESO (BONE)
POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)





Ø: 1,6mm

28-UI1

39'80€



POTENCIA: Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongius)

IRRIGACIÓN

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

- Fabricados en acero al Cromo por Tekne Dental (Italia).
- Pulidos y reforzados, **totalmente compatibles**.
- **Roscas de precisión** según DIN, **homologadas**.

PiezoLED, PIEZOsoft y COMPATIBLES



PUNTA AX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva. Equivalente KaVo® 201



KP2

Punta de raspado universal para la eliminación del sarro supragingival en todos los cuadrantes. Trabajar desde el borde incisal hasta el surco. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta.

Ref.:

40-43001

PUNTA BX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva aplanada



KP2

Especialmente diseñada para eliminar el sarro supragingival, recubrimientos y manchas en todas las superficies dentales.

Ref.:

40-43002

PUNTA CX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva aplanada



KP2

Especialmente diseñada para eliminar grandes depósitos supragingivales de cálculo.

Ref.:

40-43003

◆ PUNTA PLX3 + LLAVE DYNO | Perio diamantada. Equivalente KaVo® 211



KP2

Cuenta con un revestimiento de diamante (70µm) ideal para un alisado radicular minucioso en línea de visión directa, alisado de proyecciones de restauración y la prolongación de techos de furca.

Ref.:

40-43013

BAJO PEDIDO

◆ PUNTA PLX1 + LLAVE DYNO | Perio curvada a la derecha. Equivalente KaVo® 212



KP2

Diseñada para el desbridamiento periodontal. Especialmente indicado para superficies proximales inaccesibles (lingual, bucal) y en particular para surcos radiculares. Utilizar la superficie lateral de las puntas.

Ref.:

40-43011

BAJO PEDIDO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

PUNTA PLX2 + LLAVE DYNO | Perio curvada a la izquierda. Equivalente KaVo® 213



KP2

Diseñada para el desbridamiento periodontal. Especialmente indicado para superficies proximales inaccesibles (lingual, bucal) y en particular para surcos radiculares. Utilizar la superficie lateral de las puntas.

Ref.:

40-43012

BAJO PEDIDO

PUNTA PX + LLAVE DYNO | Perio larga. Equivalente KaVo® 202



KP2

Diseñada para la eliminación del cálculo supra y subgingival en todos los cuadrantes hasta una profundidad de bolsa de 4 mm. Especialmente indicado para intersticios dentales y la zona del surco. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta

Ref.:

40-43004

PUNTA PSX + LLAVE DYNO | Perio larga, extra fina. Equivalente KaVo® 205



KP2

Diseñada para la eliminación de depósitos subgingivales en superficies radiculares. Las bolsas periodontales profundas y tratamientos / revisiones periodontales preventivas. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta. Tratamiento suave (niños).

Ref.:

40-43005

NUEVO

PUNTA EX + LLAVE DYNO | Endodoncia, Endochuck ángulo 120°



KP2

Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores.

Ref.:

40-43008

BAJO PEDIDO

NUEVO

PUNTA EX PIR + LLAVE | Perio, Endochuck ángulo 120° (Punta soporte + 1 punta PEEK)



KP2

Soporte 120° para puntas Peek + 1 punta peek. Recomendada para limpieza y mantenimiento de implantes, coronas y puentes.

Ref.:

40-43009

BAJO PEDIDO

NUEVO

PUNTAS PEEK | Perio, Set puntas PEEK, 4 uds.



Set puntas PEEK.
Recomendada para limpieza y mantenimiento de implantes, coronas y puentes.
Necesario Adaptador / Endochuck: 40-43009

Ref.:

40-43010

BAJO PEDIDO

■ PUNTA DX + LLAVE DYNO | Curva especial. Extracción de coronas



KP2

Especialmente diseñadas para extraer coronas, puentes y pivotes.

Ref.:

40-43007

► MICRON

MICRON®

■ PUNTA TTL1 | Uso universal



Inserto, TTL1 (anillo verde), uso universal

Ref.:

27-TTL1

■ PUNTA TZ01 | Plana



Inserto, TZ01 (anillo rosa), plana

Ref.:

27-TZ01

■ PUNTA TES2 | Extra larga perio



Inserto, TES2 (anillo azul), extra larga perio

Ref.:

27-TES2

PUNTAS ENDOACTIVADORES

Endoactivador ENDO3





E70 | Endodoncia, endochuck



Endochuck / Adaptador para sujetar puntas Peek E71, E72, E73 o E74
Diseñada para la limpieza o irrigación del canal radicular.
Utilizado para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo.

Ref.:

28-E70

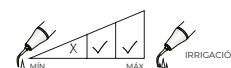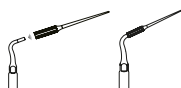

E71 | Endodoncia, Peek, Ø 0,3 x 17,7mm, 10Uds.





Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.

Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E71

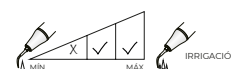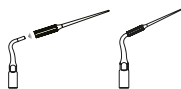

E72 | Endodoncia, Peek, Ø 0,3 x 20,7mm, 10Uds.




Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.

Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E72

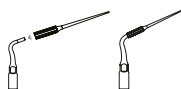

E73 | Endodoncia, Peek, Ø 0,25 x 17,7mm, 10Uds.





Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.

Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E73

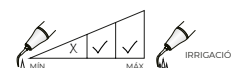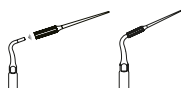

E74 | Endodoncia, Peek, Ø 0,25 x 20,7mm, 10Uds.




Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.

Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E74


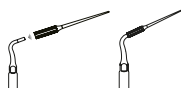


E93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E93

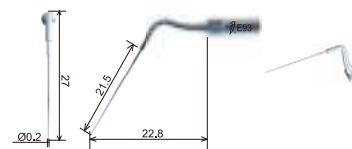
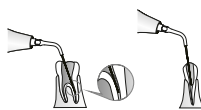


E96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable

Ref.:

28-E96

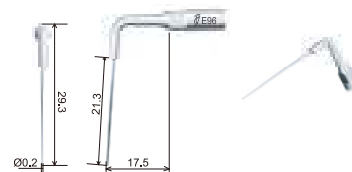
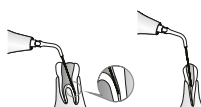


E98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E98

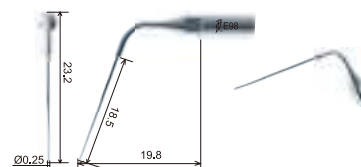
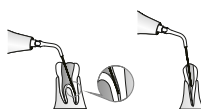


E99 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E99

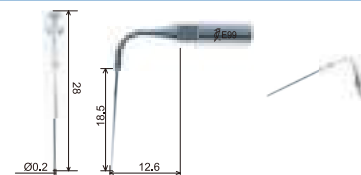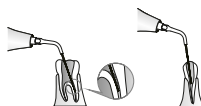

Endoactivador ENDO1 (violeta) CONEXIÓN TIPO S





ED93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-ED93

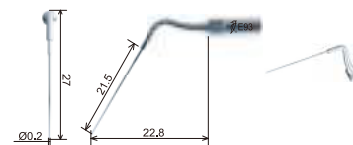
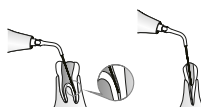


ED96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable

Ref.:

28-ED96

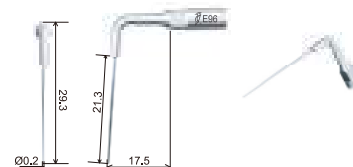
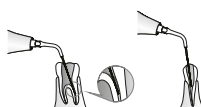


ED98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-ED98

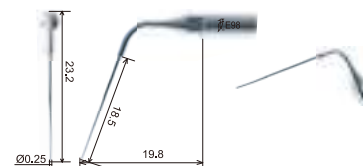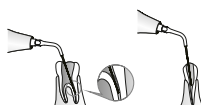

Endoactivador ENDO1 (blanco) COMPATIBLE EMS



E93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E93

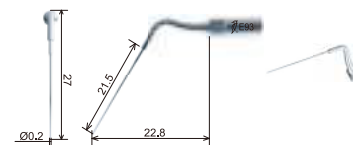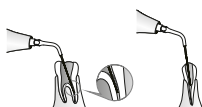



E96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable

Ref.:

28-E96

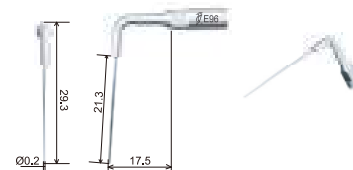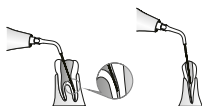

E98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:

28-E98

